

【使用方法】

- ①滅菌サンプルと一緒にエーステストをセットし滅菌します。乾熱滅菌用は培地と一体になっていませんので芽胞菌担体の入ったバイアイルのみをセットし滅菌します。
- ②培地と一体型のエーステストは滅菌終了後、割具に挟みエーステストの中の培地アンプルを割ります。培地が分かれているエーステストはクリーンベンチ内で芽胞キャリアを取り出して培地に入れます。
- ③濾紙に培地が完全に浸漬していることを確認し、蒸気滅菌用とLTSF滅菌用、プラズマ滅菌用は55～60℃、E0ガス滅菌用と乾熱滅菌用は30～35℃で24時間、48時間あるいは7日間培養し培地の色の変化を調べます。滅菌が完全に行われた場合培地の色は変わりませんが、不完全な場合は黄色に変わります。



『割具で培地アンプルを割る図』

＜インキュベーター＞ 注意：バイオロジカルインジケーターのチューブ専用のインキュベーターです。



エースミニ（22本掛け）

RT+5～80℃設定、
タイマー機能、
プログラム機能付き

【仕様】

タイプ	キャップカラー	培地の変化 (滅菌が不完全な場合に变化)	滅菌ラベルの変化 (滅菌を掛けたことの確認用)	指標菌
1. 蒸気滅菌用（ 1×10^5 以上）	ピンク	紫 → 黄	青 → 黒	Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
2. 蒸気滅菌用（ 1×10^6 以上）	ピンク	紫 → 黄	青 → 黒	Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
3. E0ガス滅菌用	グリーン	緑 → 黄	茶 → 緑	Bacillus atrophaeus ATCC 9372
4. 115℃低温蒸気滅菌用	薄ピンク	紫 → 黄	青 → 黒	Bacillus subtilis "5230" ATCC 35021
5. 乾熱滅菌用	なし	赤 → 黄	—	Bacillus atrophaeus ATCC 9372
6. LTSF滅菌用	レッド	紫 → 黄	赤 → 黄	Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953
7. ホルムアルデヒドガス滅菌用	ホワイト	紫 → 黄	—	Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953

カタログNO.	品 名	芽胞数	用 途	入 数	価 格
H3723	蒸気滅菌用エーステスト	1×10^5 以上	蒸気滅菌	100本/箱	¥43,600
H3723T	蒸気滅菌用エーステスト	1×10^6 以上	バリデーション蒸気滅菌	100本/箱	¥75,000
H3724	E0ガス滅菌用エーステスト	1×10^6 以上	エチレンオキサイドガス滅菌	100本/箱	¥43,600
H3725T	過酸化水素低温プラズマ・ガス滅菌用エーステスト	1×10^6 以上	過酸化水素低温プラズマ滅菌	100本/箱	¥78,000
H6301	低温蒸気滅菌用エーステスト	1×10^6 以上	115℃蒸気滅菌	100本/箱	¥43,600
H6302	乾熱滅菌用生物的指標培養キット（培地付）	1×10^6 以上	160～350℃乾熱滅菌	100本/箱	¥32,000
H6302M	Bacillus atrophaeus菌用培地	—	感熱滅菌用エーステストの培養	100本/箱	¥28,000
H6302K	乾熱滅菌用生物的指標培養キット（培地付）	1×10^6 以上	160～350℃乾熱滅菌	100本/箱	¥51,000
H6303T	低温蒸気ホルムアルデヒド(LTSF)滅菌用エーステスト	1×10^6 以上	低温蒸気ホルムアルデヒド滅菌機(LTSF)用	100本/箱	¥78,000
H6304T	ホルムアルデヒドガス滅菌用エーステスト (エコバルザー専用)	1×10^6 以上	ホルムアルデヒドガス滅菌機(エコバルザー用)	100本/箱	¥78,000
H8100	エースミニ（22本掛け）	—	エーステスト用インキュベーター	1台	¥77,000

（製造元）福 沢 商 事 株 式 会 社



家田貿易株式会社

〒113-0033東京都文京区本郷3-14-16 オフィス家田 TEL. 03-3816-2861 FAX. 03-3814-5347
 〒564-0053大阪府吹田市江の木町13-9 江坂シビル館Ⅱ401 TEL. 06-6338-1518 FAX. 06-6338-5626
 〒861-8035熊本県熊本市東区御領6-7-39 TEL. 096-285-1907 FAX. 096-285-1908

E-mail: boeki@ieda-group.co.jp
 URL: <http://www.ieda.co.jp/boeki/>

（販売店）